

SERVOCURA®

DE Tragegurt für Urin-Beinbeutel

EN leg bag straps

Inhalt / Contents: 1 Paar / 1 pair

Farbe / Colour: weiß / white

Material / Material

Thermoplastische Elastomer, Silikon / thermoplastic rubber, silicone

Länge / Length

- 54 cm für einen Beinumfang von 50 cm

- 54 cm for a leg circumference of 50 cm

Zweckbestimmung / Intended purpose

- Zur Befestigung von Urin-Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel

- For attaching urine leg bags to the upper or lower leg



UDI



(xx)xxxxxxxxxxxxxx
(xx)xxxxxx
(xx)xxxxxx

REF

25226



PZN

09095918



yyyy-mm

LOT

XXXXXXXXXX



Orbisana
GESUNDHEITSWELT



Orbisana Healthcare GmbH

Biberweg 24-26




53842 Troisdorf | Germany

Tel. +49 (0)2241 9322-0

info@orbisana.de

www.orbisana.de

41287/Version 2023-11-22

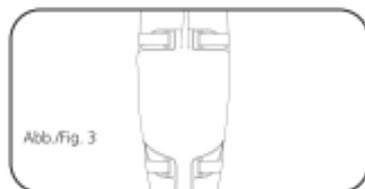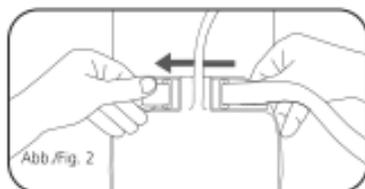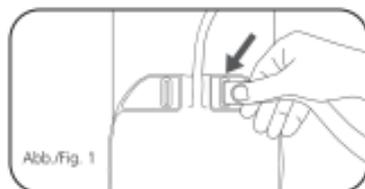

Beschreibung:

Mit SERVOCURA® Tragegurten können Urin-Beinbeutel mit Halteösen am Ober- oder Unterschenkel befestigt werden. Die Gurte werden mit einem Klettverschluss geschlossen, die gummierte Rückseite sorgt für Halt auf der Haut.

Warnung: Die Gurte nicht zu fest am Bein anziehen. Thrombosegefahr!

Anwendung:

Abb. 1: Den Tragegurt mit der gummierten Seite zum Bein von der Vorderseite durch die rechte obere vorgestanzte Halteöse des Urinbeutels stecken.

Abb. 2: Das Gurtende durch die linke obere Halteöse am Urinbeutel herausziehen, beide Gurtenden um das Bein herumführen und mit dem Klettverschluss schließen.

Abb. 3: Den zweiten Gurt entsprechend durch die beiden unteren vorgestanzten Halteösen des Urinbeutels ziehen und den Gurt schließen.



Hinweis: Zum Waschen Klettverschlüsse schließen. Vor Gebrauch vollständig trocknen lassen. Tragegurte über den Restmüll entsorgen, wenn sie beschädigt oder verfärbt sind, spätestens jedoch nach 14 Tagen.

Description:

With SERVOCURA® leg bag straps, urine leg bags with eyelets can be attached to the upper or lower leg. The straps are fixed with a Velcro fastener, the rubberized backside provides support on the skin.

Warning: Do not tighten the straps too tight on the leg. Risk of thrombosis!

Instructions for use:

Fig. 1: Insert the strap with the rubberized backside to the leg from the front through the upper right pre-cut eyelet of the urine bag.

Fig. 2: Pull the strap end out through the upper left pre-cut eyelet, pass both strap ends around the leg and close with the Velcro fastener.

Fig. 3: Pull the second strap according to the first strap through the two lower pre-cut eyelets of the urine bag and close the strap.



Note: Close the Velcro fasteners for washing. Let dry completely before use. Dispose of the straps in domestic waste, if they are damaged or discolored, at the latest after 14 days.

Verwendete Symbole / Symbols used

				
DE	CE-Kennzeichen	Bestellnummer	Chargenbezeichnung	Medizinprodukt
EN	CE mark	Order number	Batch number	Medical device
				
DE	Hersteller	Herstelldatum	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	
EN	Manufacturer	Date of manufacture	Do not use if the packaging is damaged	
				
DE	Wiederverwendung an einem einzelnen Patienten	Vor Sonnenlicht schützen	Trocken aufbewahren	
EN	Single patient multiple use	Keep away from sunlight	Keep dry	
				
DE	Gebrauchsanweisung beachten	Der Grüne Punkt	Internetseite mit Patienteninformation	
EN	Consult the instructions for use	The Green Dot	Patient Information Website	
			PZN	
DE	Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts		Pharmazentralnummer	Inhalt
EN	Unique device identifier		Central pharmaceutical number	Content